


CAD-Software



**Anleitung Freischaltung
CAD Software
Zusatzmodule
Instructions
for Activation of
the CAD Software for
Additional Modules**

CAD DONGLE AKTIVIERUNG

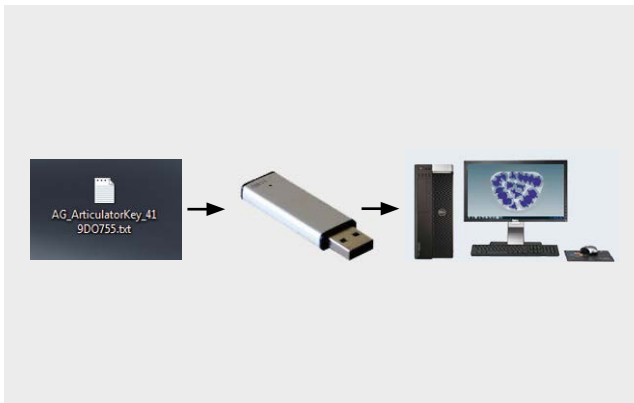


Die Freischaltung der Zusatzmodule für die CAD-Software erfolgt über die Eingabe des Freischaltcodes in das Dongle Tool.


Transferieren Sie die per Email erhaltene Keycode txt-Datei auf den Desktop Ihres Konstruktionsrechners (z.B. mittels USB Stick).



Achten Sie darauf dass der CAD-Software Dongle am Rechner eingesteckt ist!

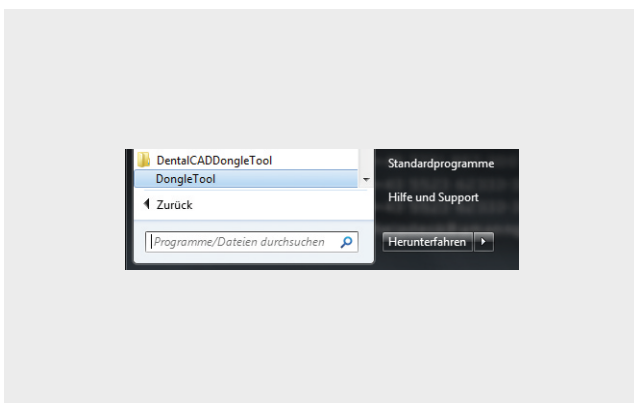


Starten Sie das Dongle Tool über das Windows Start Menü.

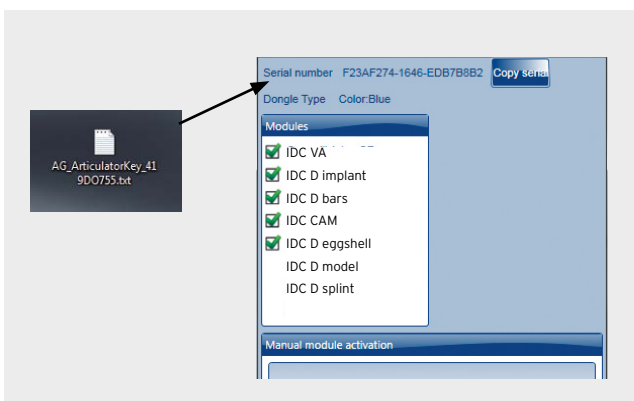

Ziehen Sie die erhaltene txt-Datei auf die Seriennummer im Fenster des Dongle Tools.


Nach erfolgreicher Freischaltung erscheint ein grünes Häkchen vor dem jeweils freigeschalteten Software Modul!

FREISCHALTUNG ZAHNBIBLIOTHEK CAD-SOFTWARE

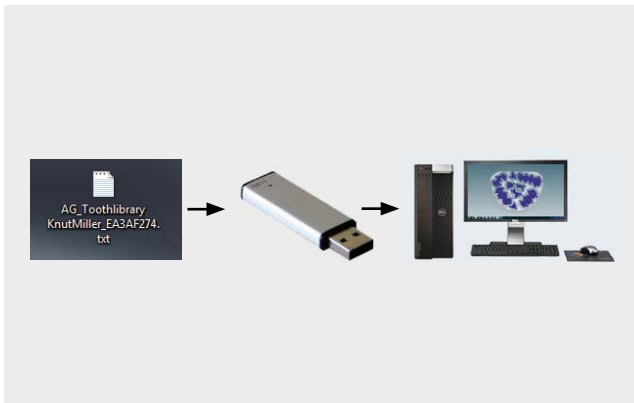


Die Freischaltung der kostenpflichtigen CAD-Software Bibliothekszähne erfolgt über einen Transfer des Freischaltcodes in das Library Activation Tool.


Transferieren Sie die per Email erhaltene Keycode txt-Datei auf den Desktop Ihres Konstruktionsrechners (z.B. mittels USB Stick).

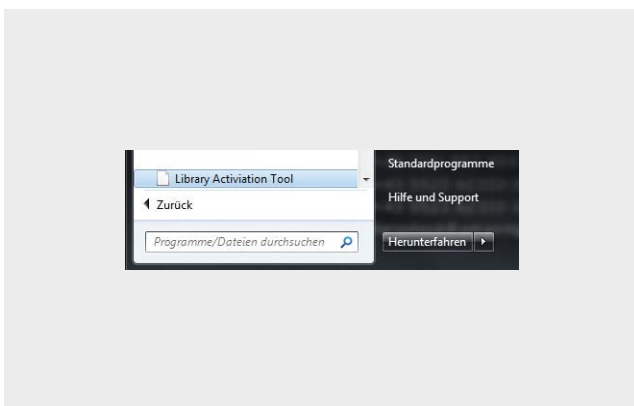

Starten Sie das Library Activation Tool aus dem Windows Start Menü heraus.

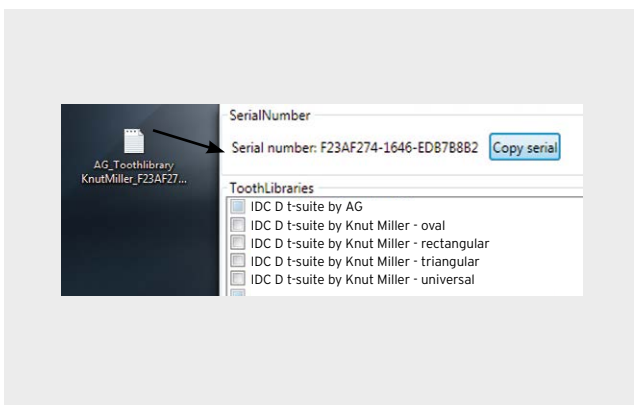


Ziehen Sie die erhaltene txt-Datei auf die Seriennummer im Fenster des Tools.

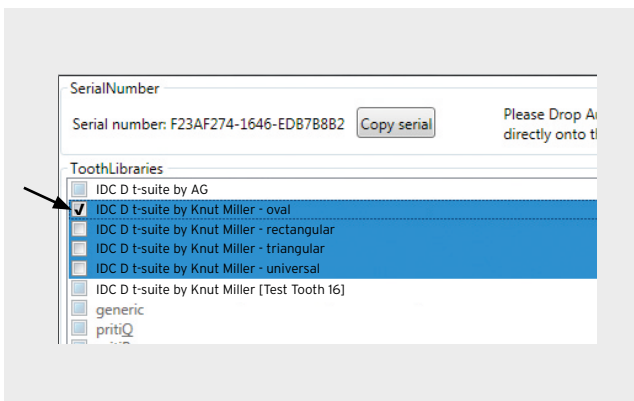

Nach erfolgreicher Freischaltung erscheint ein grünes Häkchen vor der jeweils freigeschalteten Zahnbibliothek.

CAD DONGLE ACTIVATION

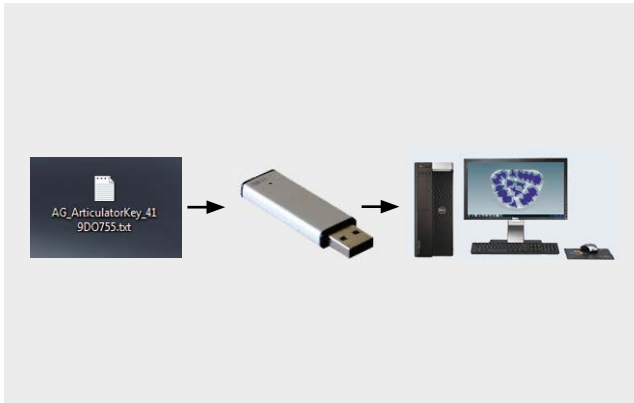


The additional modules for the CAD-Software are unlocked via the activation code in the dongle.

Transfer the keycode txt-file received (by e-mail) to the desktop of your PC (e.g. via USB stick).


EN



Pay attention that the CAD-Software Dongle is plugged in at your PC!

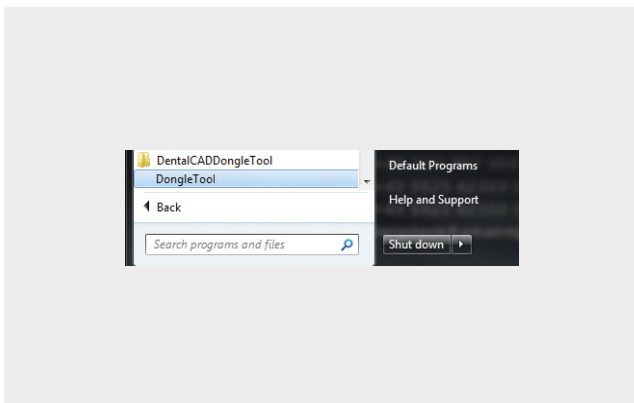


Start the dongle from the Windows start menu.

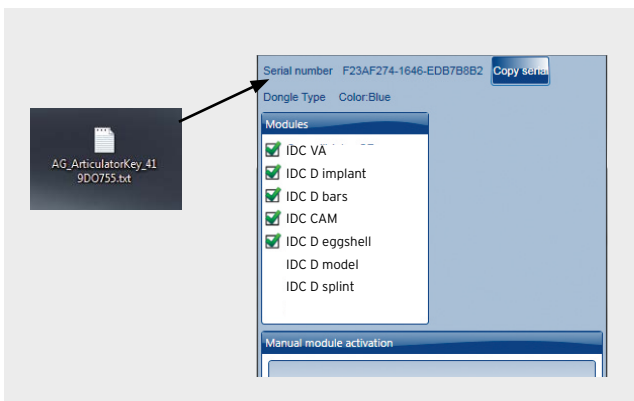

Drag the txt-file to the serial number in the Dongle Tool window.


Following the successful release, there is a green checkmark in front of the individual software module being activated!

ACTIVATION CAD-SOFTWARE TOOTH LIBRARY

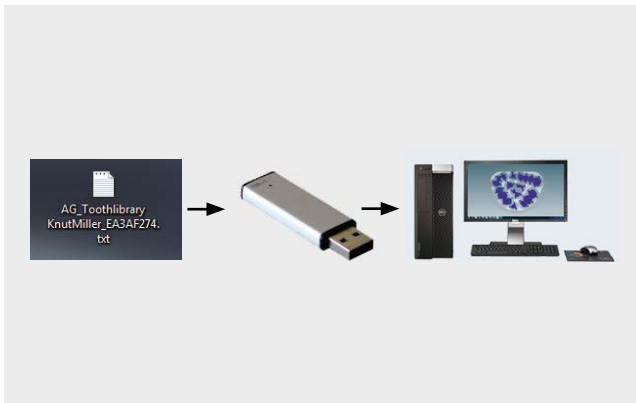


The CAD-Software library teeth, which must be purchased, are activated by transferring the activation code into the library activation tool.


Transfer the key code txt-file included to the desktop of your design computer (e.g. using a USB stick).

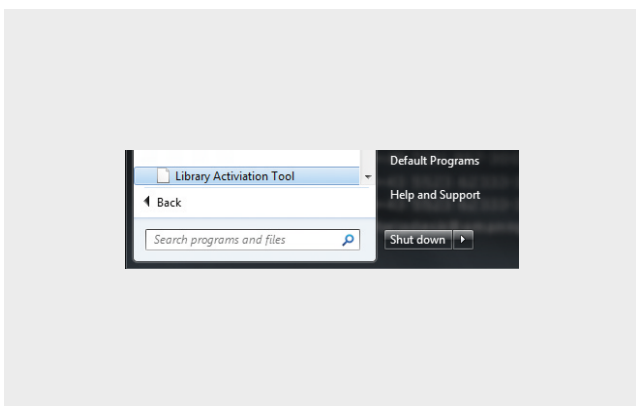

Start the library activation tool from the Windows Start Menu.

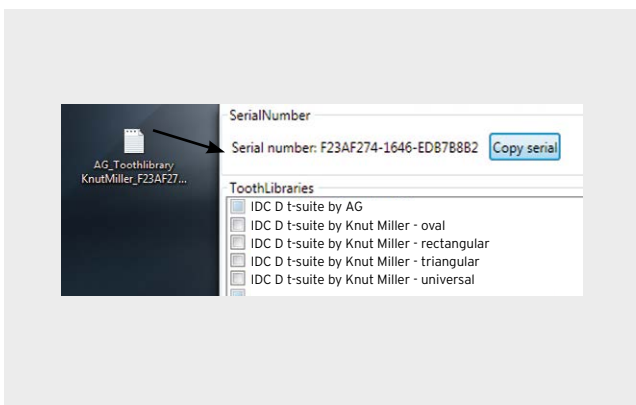

Drag the txt-file to the serial number in the tools window.

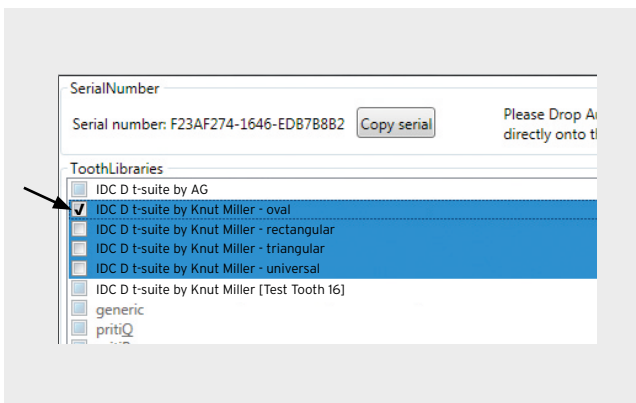

After successful activation, a green tick appears in front of the respective activated tooth library.



Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@idc.dental
www.idc.dental



Made in the European Union